

Estudio en Líquido Amniótico: Instrucciones para el envío de muestras

- ❗ La muestra debe ser obtenida a partir de la semana 16 de gestación, de preferencia usar jeringas de marca Nipro. Muestras obtenidas entre las semanas 14 y 15 de gestación tienen células escasas, lo que podría aplazar la entrega de resultados o no crecimiento.
- ➡ Enviar la muestra con el consentimiento informado firmado y la orden de estudio citogenético con los datos solicitados.

Condiciones de la muestra

VOLUMEN	- Extraer 15 - 20 mL de líquido amniótico. - Enviar la misma jeringa de extracción fijando el émbolo, la aguja y el capuchón con esparadrapo o cinta adhesiva.
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente. NO REFRIGERAR, NI CONGELAR.
TEMPERATURA DE TRANSPORTE	Envíos en Lima Metropolitana: Temperatura ambiente (15-20°C) Envíos desde el interior del país: Enviar la muestra a temperatura ambiente y coordinar la hora de llegada con el laboratorio para facilitar la disposición de recursos y procesamiento.

- ❗ **CRITERIOS DE RECHAZO DE MUESTRA:**
 - Muestras no enviadas en las condiciones requeridas.
 - Volumen menor a 15 mL.

Entrega de resultados

- ✓ **Tiempo:** 15 calendario.
- Nota:** Al ser un cultivo de células vivas el tiempo de respuesta es promedio. Así mismo, existe una tasa de fallo de cultivo del 1-2%.