

Estudio de Restos Embrionarios: Instrucciones para el envío de muestras

La muestra de restos embrionarios debe obtenerse en condiciones estériles, agregar todo el contenido del legrado en el frasco estéril.

- ➡ Enviar la muestra con el consentimiento informado firmado y la orden de estudio citogenético con los datos solicitados.

Condiciones de la muestra

VOLUMEN *Kit de transporte: Frasco y medio de cultivo estériles. ⚠ Importante: No agregar formol a la muestra.	1. Solicitar el kit estéril de transporte*. De no ser posible, utilizar un colector biológico (frasco para urocultivo) y suero fisiológico. 2. Colocar todo el contenido del legrado en el frasco estéril y agregar el medio de transporte. Si se tratara de un feto mayor a 15 semanas, enviar toda la placenta.
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	Remitir la muestra inmediatamente al laboratorio o conservarla en refrigeración de 2 - 8°C. NO CONGELAR.
TEMPERATURA DE TRANSPORTE	Desde el interior del país: Enviar la muestra con geles refrigerantes evitando el contacto directo del gel con la muestra.
ESTABILIDAD	Para garantizar un cultivo exitoso, la muestra debe llegar dentro de las 24 horas de haber sido realizado el legrado, hasta un máximo de 48 horas.

- ⚠ **IMPORTANTE:** En caso de no crecimiento de las células cultivo, el estudio será reemplazado por el estudio de cromosomas a los padres.

Entrega de resultados

- ✓ **Tiempo:** De 15 a 21 días calendario.
Nota: Al ser un cultivo de células vivas, el tiempo de respuesta es promedio.