

Estudio en Sangre Periférica: Instrucciones para el envío de muestras

- Enviar la muestra con el consentimiento informado firmado y la orden de estudio citogenético con los datos solicitados.
- ✓ **CONDICIONES DEL PACIENTE:** No debe estar bajo tratamiento con antibióticos al menos 10 días antes de la toma de muestra. No requiere ayuno previo.

Condiciones de la muestra

VOLUMEN	1. Extraer 4 ml de sangre periférica en un tubo de extracción al vacío con heparina de sodio. No usar otro anticoagulante. En caso de dificultades en la toma de muestra se puede aceptar un volumen mínimo de 2 mL.
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	Remitir la muestra inmediatamente al laboratorio. De no ser posible, puede conservarse en refrigeración de 2 - 8°C. NO CONGELAR.
TEMPERATURA DE TRANSPORTE	Envíos en Lima Metropolitana: Temperatura ambiente (15-20°C) Envíos desde el interior del país: Enviar la muestra con geles refrigerantes evitando el contacto directo del gel con la muestra.
ESTABILIDAD	Para garantizar un cultivo exitoso, la muestra debe llegar dentro de las primeras 48 horas.

- ❗ **CRITERIOS DE RECHAZO DE MUESTRA:**
 - Muestra con anticoagulante diferente de Heparina sódica
 - Muestra hemolizada 2+ o total
 - Muestra con coágulos

Entrega de resultados

- ✓ **Tiempo:** 15 días calendario. **Nota:** Al ser un cultivo de células vivas, el tiempo de respuesta es promedio. Asimismo, existe una tasa de fallo de cultivo del 1-2%.