

Estudio en ADN Libre Fetal: Protocolo de toma de muestras

Requisitos de la prueba

- ✓ No requiere ayunas.
- ✓ Consentimiento informado firmado.

Condiciones médicas

- ✓ Más de 10 semanas de gestación por fecha de última regla o por ecografía.
- ✓ Embarazo único, es decir, gestación de un sólo bebé.
- ✓ Embarazo producto de gametos de la pareja, no donante de óvulo.

Toma de muestra



Venopunción con vacutainer, usando aguja de 21G.



Extraer 10ml de sangre en el tubo proveído para preservar ADN libre.

❗ **IMPORTANTE:** Elija una vena adecuada. Permita que la sangre fluya suavemente. Evitar que el torniquete esté por más de 1 minuto.



Rotular tubos con nombre, apellido y fecha de nacimiento, tal cual dice en la orden médica.

❗ **IMPORTANTE:** No cubrir el código barras ni QR del tubo.



Retirar el tubo lleno, rotar el tubo 180 grados suavemente por 10 veces.

❗ **IMPORTANTE:** No agitar, ni mover bruscamente.

ENVÍO DE MUESTRA

Colocar el tubo en la bolsa preveída.
No refrigerar. Mantener a temperatura ambiente.
Enviar en un plazo máximo de 24 horas.